

## バイオロジカルインジケター (二酸化塩素ガス空間滅菌用)

### 《使用説明書》

#### 菌種

Bacillus atrophaeus NBRC13721 (ATCC 9372)

#### 培地成分

培地:ソイビーン・カゼイン・ダイジェストブロス

指示薬:フェノールレッド

#### 保管上のご注意

- ・ 2~25°C、20%~80%RH で遮光保管してください。  
(培地は 2~10°Cで保管してください。)
- ・ 滅菌器や殺菌消毒剤から離れた場所に保管してください。

#### 使用前のご注意

- ・ 使用前に有効期限を確認してください。
- ・ 使用前に本品の完全性を確認してください。
- ・ 冷蔵保存の場合、室温になってから使用してください。

#### 廃棄際のご注意

- ・ 滅菌不十分と判定された使用済み及び期限切れの本品は、必ず滅菌処理(121°C、30分)を行った後廃棄してください。

## 使用方法

- 1 所定の箇所に芽胞菌袋を置き、滅菌をかけます。
- 2 滅菌処理後、袋をクリーンベンチに持って行き、無菌状態で袋から芽胞キャリアを取り出し、培地の中に入れます。
- 3 蓋を締め、専用の「ACE mini インキュベーター(品番:H8200)」にて **30~37°C**で二日間或は七日間を培養します。
- 4 陽性コントロール:滅菌処理をしていない芽胞菌袋から芽胞キャリアを取り出し、培地の中に入れ、同様にインキュベーターにて培養します。陽性コントロールは、使用毎に用いてください。

## 結果判定

### 陰性

⇒ 培地の色は赤色から変化なし ⇒ 滅菌完全

### 陽性

⇒ 陽性コントロールのように、培地の色変化あり(赤色から黄色)  
⇒ 滅菌不完全



製造者

上海福沢医薬器材有限公司

<http://www.fzme.com>

発売者

福沢商事株式会社

〒233-0013 横浜市港南区丸山台 2-36-30

TEL:045-845-2699 FAX:045-845-2889