

生物指示剂 (压力蒸汽灭菌-液体灭菌专用)

《使用说明书》

菌种

Geobacillus stearothermophilus NBRC13737 (ATCC 7953)
嗜热脂肪芽孢杆菌

培养基成分

培养基: 大豆蛋白胨培养基
指示药: 溴甲酚紫指示剂

使用范围

用于 121°C 等压力蒸汽喷淋或液体灭菌效果监测。

保管上的注意

- 请在 5~8°C 避光保管。
- 请在远离灭菌器和消毒杀菌剂之处保管。

使用前的注意

- 使用前请确认有效期限。
- 使用前请确认产品的完整性。
- 请在产品温度回到室温后使用。

废弃时的注意

- 灭菌不完全的阳性指示剂以及超出有效期限的产品, 请务必在灭菌处理 (121°C、30 分钟) 后废弃。

使用方法

- 1 将塑料管中的紫色含菌管取出, 放入被灭液中, 进行灭菌。
- 2 灭菌处理后, 将紫色含菌管放回塑料管内, 拧紧瓶盖。
- 3 将塑料管放入培养器内培养, 在 **56~58°C** 温度间培养 48 小时。
- 4 阳性对照: 将未经过灭菌处理的本品同时进行培养。每次培养时都必须使用阳性对照。

结果判定

阴性

⇒ 培养基颜色保持紫色不变 ⇒ 灭菌完全

阳性

⇒ 参照阳性对照管的颜色, 培养基颜色发生变化 (紫色变成黄色)
⇒ 灭菌不完全

企业卫生许可证: 沪卫消证字 (2016) 第 0023 号



生产商

上海福泽医药器材有限公司
上海闵行区申富路 128 号 (邮编: 201108)
TEL: 021-54422550 FAX: 021-54422510
<http://www.fzme.com>

発売者

福沢商事株式会社